

Inicio Rápido

1. Después de retirar el Amigo HD de su envoltura, conéctelo a la fuente de alimentación.
2. Pulse el botón verde de encendido.
3. Abra el soporte a su primera posición.

Le recomendamos que cargue el Amigo HD durante 2-3 horas antes del primer uso.



4. Coloque el Amigo HD sobre el material de lectura deseada.

5. Pulse el botón azul "Mode" para seleccionar la mejor calidad de imagen para su condición visual. Mantenga pulsado para navegar por todas las imágenes.



6. Pulse el botón Amarillo "Más o Menos" para aumentar o disminuir la ampliación.
7. Si es necesario ajustar el brillo, use el joystick blanco presionando de izquierda a derecha.

8. Su Amigo HD se establecerá para el enfoque automático (AF). Si no enfoca, localizar y mover el botón MF/AF a la posición AF.



Comience a leer y disfrutar de su nuevo Amigo HD. Consulte el Manual de Usuario para funciones, más avanzadas.